

seca 416

Infantômetro para
medir bebês e crianças
no hospital



- Construção robusta para medição precisa.
- Corrige automaticamente a posição deitada devido à área de repouso em forma de calha.
- Escala impressa na parte de cima para fácil leitura.
- Compacto.

seca 416:

Construção estável como base para medição precisa.

Uma das tarefas principais em pediatria é reconhecer rapidamente os distúrbios do crescimento em crianças. Só então, é possível aplicar terapias eficazes para evitar também doenças que podem surgir a partir desses distúrbios. Apenas resultados precisos levam a um diagnóstico correto – a fim de verificar o quão rápido uma criança cresce em cm/ano (essencial para a avaliação dinâmica do crescimento de uma criança), a precisão milimétrica é necessária. Essa precisão é impossível com os dispositivos convencionais de madeira e metal. Mas é possível com o infantômetro seca 416. Especialmente adequado para pediatras exigentes em hospitais e consultórios.



Resultados precisos com a área de repouso em forma de calha.

O design completamente novo do infantômetro seca 416 possibilita a medição extremamente precisa de bebês e crianças com até dois anos de idade. A grande área de repouso com suas extremidades levemente arredondadas posiciona o bebê de forma rápida e segura na posição correta. Os resultados precisos podem ser obtidos sem estresse.



O posicionador de pés trava na posição certa para capturar os resultados.

Medição suave com freio automático.

O apoio de pés do infantômetro desliza suavemente pela escala de medição em duas passadeiras. Assim que o tamanho do bebê tiver sido medido, o freio automático garante que o apoio é travado. Assim, mesmo se o bebê for inquieto, o apoio não pode ser deslocado e o resultado alterado. É possível retirar o bebê e anotar o resultado após a medição. Basta tocar em um botão para o freio ser liberado de forma rápida e fácil.

Indicador de fácil leitura.

A escala de medição do infantômetro seca 416 está localizado na extremidade superior e é de fácil leitura. O resultado pode ser lido rapidamente em um indicador com moldura vermelha onde uma seta clara marca o resultado exato. A escala apresenta medições em centímetros e polegadas e ainda é fácil de ler após o uso frequente. A superfície do infantômetro é resistente à abrasão e insensível a desinfetantes.

O formato em V único automaticamente coloca o bebê na posição de medição correta.



seca 416

Dados técnicos

- Faixa de medição: 33–100 cm
- Graduação: 1 mm
- Dimensões (PxAxD): 1,103 x 169 x 402 mm
- Peso: 3.2 kg